



**US
DENTAL
DEPOT**

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325

Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

www.USDENTALDEPOT.com

JAT BRACKET GOLD LINE



(Reacondicionador de brackets)

“Um nuevo concepto del equipo “

Instalación y uso:

Conectar el equipo en la red de aire.

- 1) Retirar la tapa abriendo las trabas de presión.
- 2) Retirar el 1° filtro.



US DENTAL DEPOT

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325


Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

www.USDENTALDEPOT.com

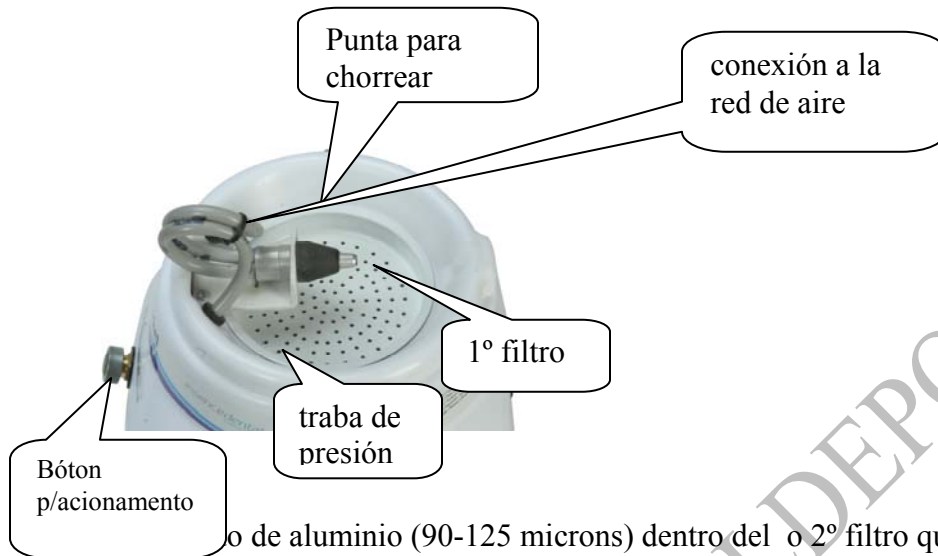

Colocar el filtro de aluminio (90-125 microns) dentro del o 2º filtro que se encuentra en el interior del equipo hasta el nivel indicado en la etiqueta.



- 4) Colocar de nuevo el 1º filtro , cerrar a la tapa ,y las trabas laterales de presión.
- 5) Retirar el émbolo, colocar el bracket en el silicón adhesivo o fijar en una camada de cera n. 7 (cuidando que la cara vestibular del bracket quede cubierta por el silicón para proteger su brillo original) .



**US
DENTAL
DEPOT**

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325


Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

www.USDENTALDEPOT.com

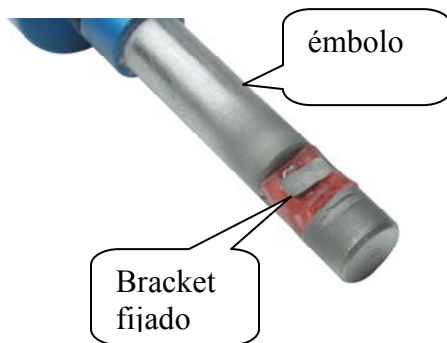

6) Inserte el émbolo en el equipo y presione el botón con el tiempo necesario para limpiar la pieza. El tiempo previsto es aproximado de 10 a 25 segundos, de acuerdo con la cantidad de resina a ser retirada..

Girar el botón del émbolo para izquierda y derecha durante el procedimiento, para que tenga una limpieza uniforme en el bracket.. (Procedimiento para los brackets standard , monobloc)

Para los brackets “slims” no es necesario girar el botón para izquierda y derecha ; basta presionar el botón en el centro indicador que el chorro será uniforme.

La operación podrá ser repetida, caso o resultado no presentarse satisfactorio.

7) Al retirar el bracket del émbolo estará en condiciones de colocarlo de inmediato, ya que el equipo retiró toda la resina que tenía el bracket encima, dentro y por detrás de la malla.

Nota: No debe calentar el bracket para retirar la resina, porque al calentar el metal del bracket altera el templado y dureza del metal, y al final del tratamiento notará que el metal cedió y no el diente en donde se colocó el bracket.

Beneficios:

- Equipo confeccionado en PSAl , diseño moderno e ergonômico.
- Limpia e reacondiciona brackets metálicos e cerâmicos sin perder su brilho original
- Proporciona un aumento de área de contacto con la malla.
- Possui um sistema hermético de abrasão
- No utiliza gabinete para la limpieza.
- No é necesario sujetar los brackets con las manos para la limpieza.



**US
DENTAL
DEPOT**

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325

Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

www.USDENTALDEPOT.com

Características Técnicas:

- Presión de Uso: 50-80 lbs
- Tipo de óxido : 90 a 125 microns
- Dimensiones: 17,5 cm x25,5 cm x 23 cm
- Peso neto: 937 grs

www.USDENTALDEPOT.com